

WICHTIGE PRAXISINFORMATION ÜBER DIE UMSTELLUNG DES TESTVERFAHRENS zum **01.12.2025**

Quantitativer Nachweis von **Calprotectin** und **Elastase-1** in Stuhlproben über die **LIAISON® Q.S.E.T. Device Plus-** Methode

Alle Vorteile für Sie im Überblick:

Schnellere Ergebnisse von zwei Parametern bei nur einer Probennahme

Das **LIAISON® Q.S.E.T. Device Plus** vereinfacht die Vorbereitung von Stuhlproben und gewährleistet genaue und schnelle Ergebnisse für diagnostische Tests. Für eine vereinfachte Extraktion von Stuhlproben für die **LIAISON® Calprotectin-** und die **LIAISON® Elastase-1-** Tests. Somit wird für zwei Parameter nur noch ein Teströhrchen benötigt.

Einfache Probenentnahme für den Patienten direkt von Zuhause

Die Vorbereitung von Stuhlproben ist mit dem **LIAISON® Q.S.E.T. Device Plus** sehr einfach. Das **LIAISON® Q.S.E.T. Device Plus** enthält ein Polypropylen-Röhrchen zum Mischen mit einem schwarzen Trichter, Schraubdeckel und einem weißen Probenstab mit einem blauen Deckel. Es wird das integrierte Probenentnahmestäbchen verwendet, um die richtige Menge an Probe zu entnehmen. Dies gewährleistet eine korrekte Probenentnahme für genaue Tests bequem für den Patienten von Zuhause aus.

Die **LIAISON® Q.S.E.T. Device Plus-** Methode ist vollkommen unkompliziert und hygienisch in der Anwendung. Eine mitgelieferte Anleitung zeigt die richtige Entnahme der Stuhlprobe für den Patienten in 4 einfachen Schritten.

Wie funktioniert's

Sie können die Röhrchen unter der Bestellnummer **REF319060** (Hersteller DiaSorin Inc.) ganz einfach in unserem Lager anfordern. Sie erhalten zu den Röhrchen Flyer mit einer kurzen Anleitung für Ihre Patienten zur genauen Durchführung der Probennahme. Die Röhrchen haben i.d.R. eine Haltbarkeit von einem Jahr.

Die Patienten sollten die befüllten Röhrchen am besten am gleichen Tag bei Ihnen abgeben. Sie können diese dann direkt an unser Labor zur Diagnostik weiterschicken.

Ein Einsenden von nativen Stuhlproben ist für die Untersuchung auf Calprotectin und Elastase-1 in Zukunft nicht mehr nötig!

Hinweis: Sollten Sie zusätzlich eine Stuhlauffanghilfe anfordern wollen, können Sie diese gerne in unserem Lager extra bestellen.

Ihre Ansprechpartner bei uns

Dr. Kristina Kleinschnitz (Außendienst)
Tel.: 0171 9592066
kleinschnitz@labor-hermann.de

Lager/Labor-Abholdienst
Tel.: 0931 2090-371
Fax: 0931 2090-210

Zentrale
Tel.: 0931 2090-100
Fax: 0931 2090-111

